



Manual de Instalação © Odonto.i 3D

Maestro Studio Viewer



Introdução

Ortho Studio Viewer, é um **poderosa** ferramenta para visualização e manipulação de modelos de estudo 3D.

A Odonto.i **3D** adquiriu os direitos para distribuí-la a seus clientes indicadores.

Como o programa é controlado, é necessário (**uma única vez**), fazer o registro do programa.

A seguir, você terá todo o auxílio necessário para fazê-lo.

Instalação



Adquira gratuitamente uma das duas versões do software (32 ou 64 bits) através de:

- Site da Odonto.i 3D (www.odontoi.com.br/maestro);
- Link direto fornecido em palestras ou cursos;
- Mídia (CD ou pendrive) fornecido.


Execute um dos arquivos abaixo, de acordo com o seu Windows (verifique se o seu é 32 ou 64 bits):

Maestro.3D.Ortho.Studio.Viewer.32bit.exe

Maestro.3D.Ortho.Studio.Viewer.64bit.exe


1

A seguir você terá a seguinte janela... Escolha **português** e clique OK

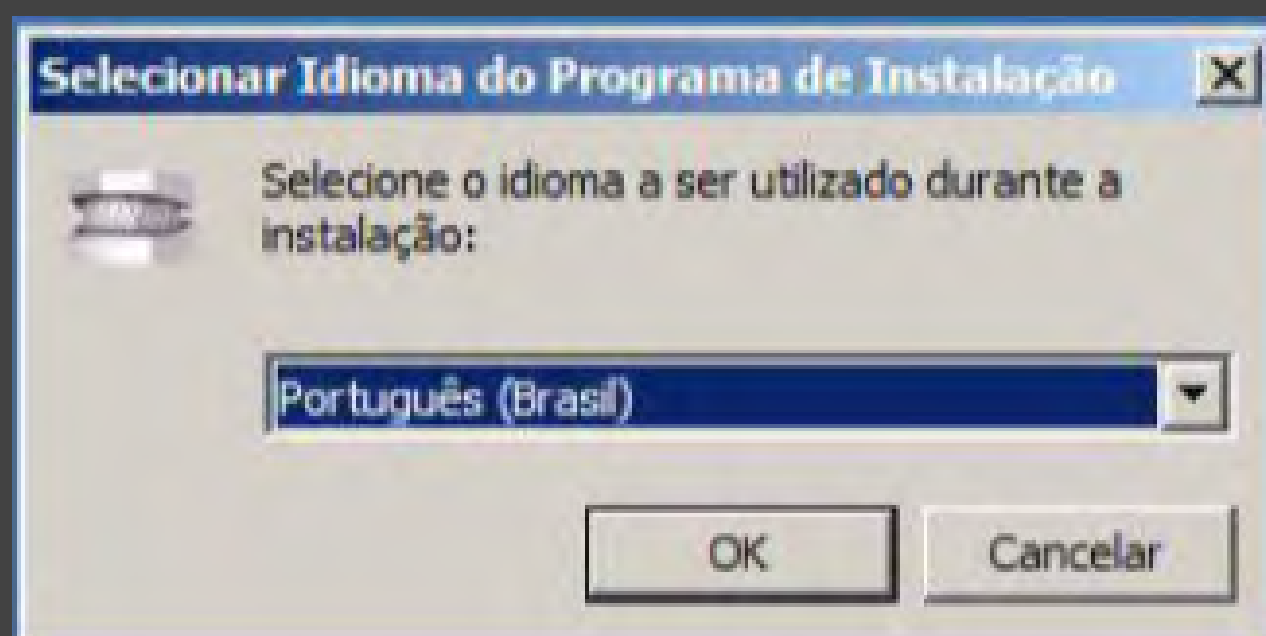


2

Na tela de boas vindas, clique em **Avançar**.

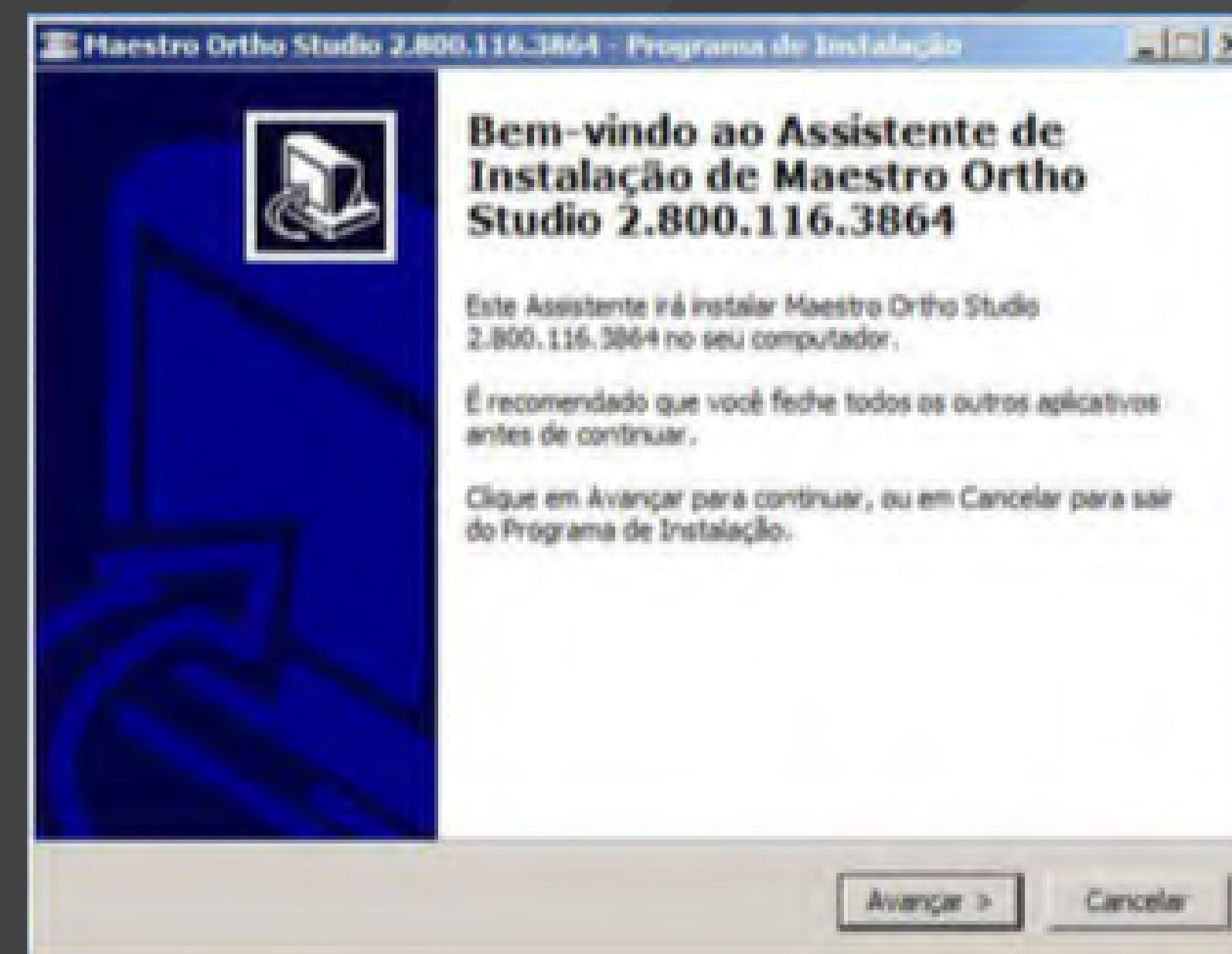


3

Marque a caixa com “Eu aceito os termos...” e clique em “**Avançar**” ...

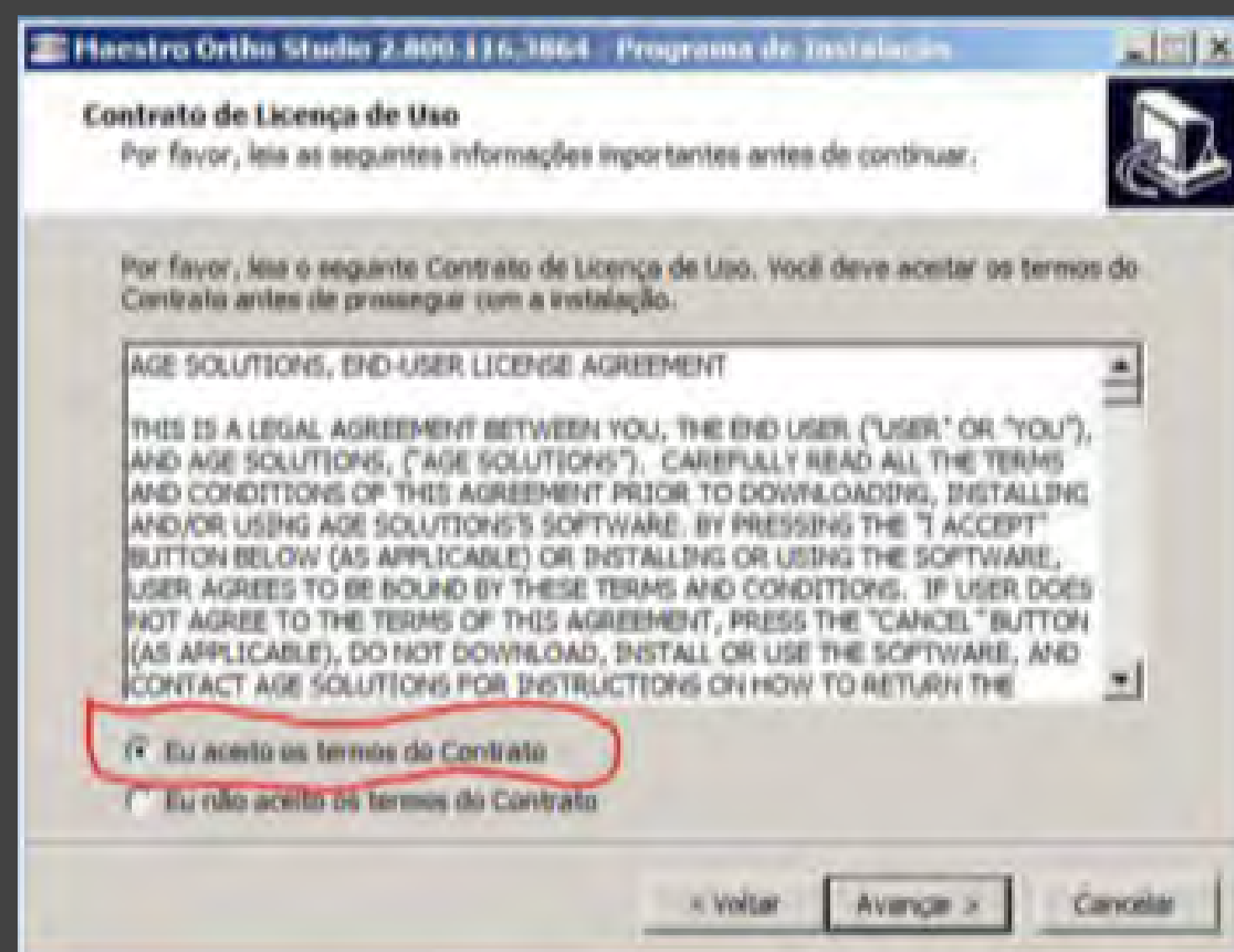


4

A próxima tela pede um destino para instalar... Não perca tempo: **avance** novamente.

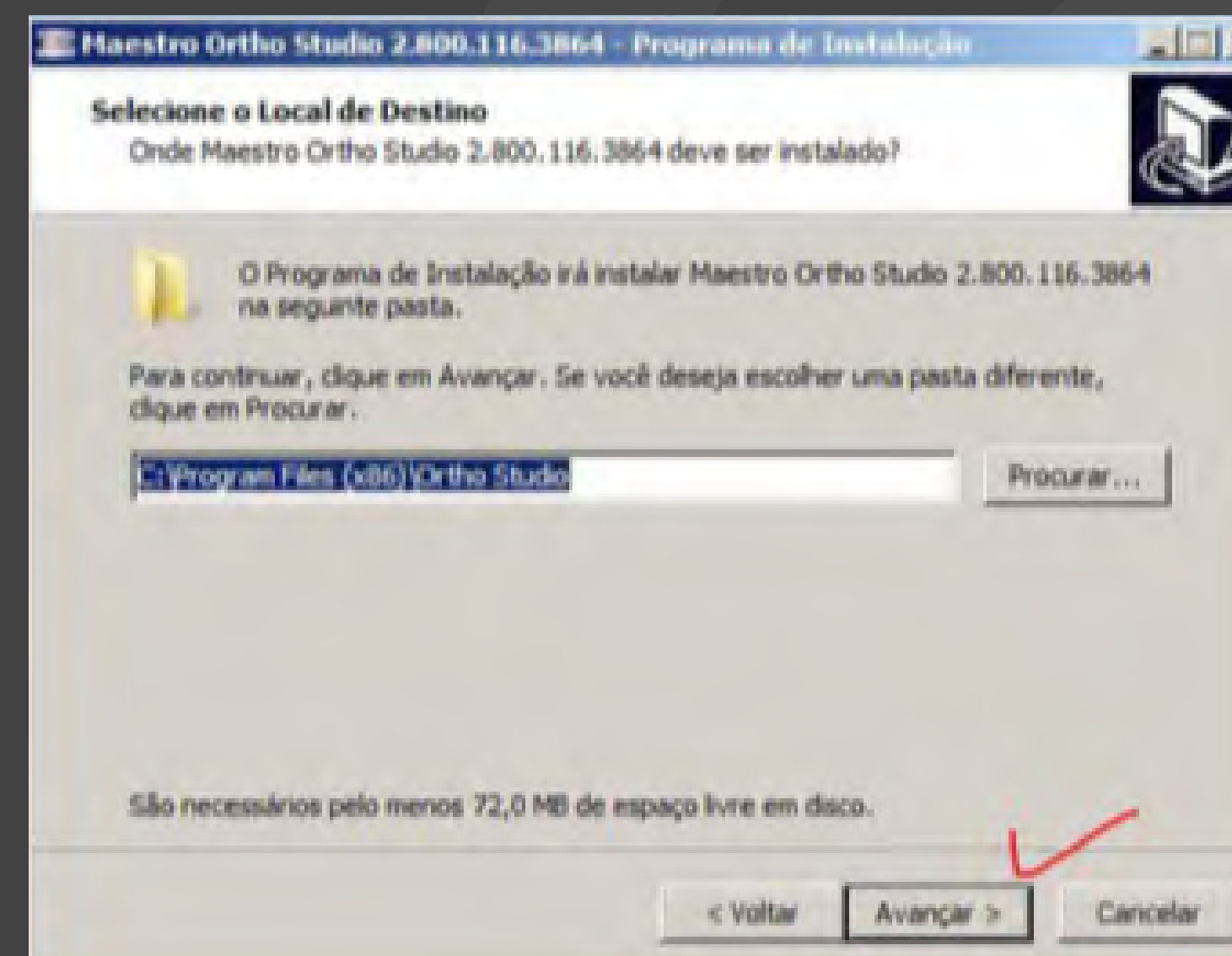


5

Agora pede um atalho...
Novamente **avance** sem preocupações.

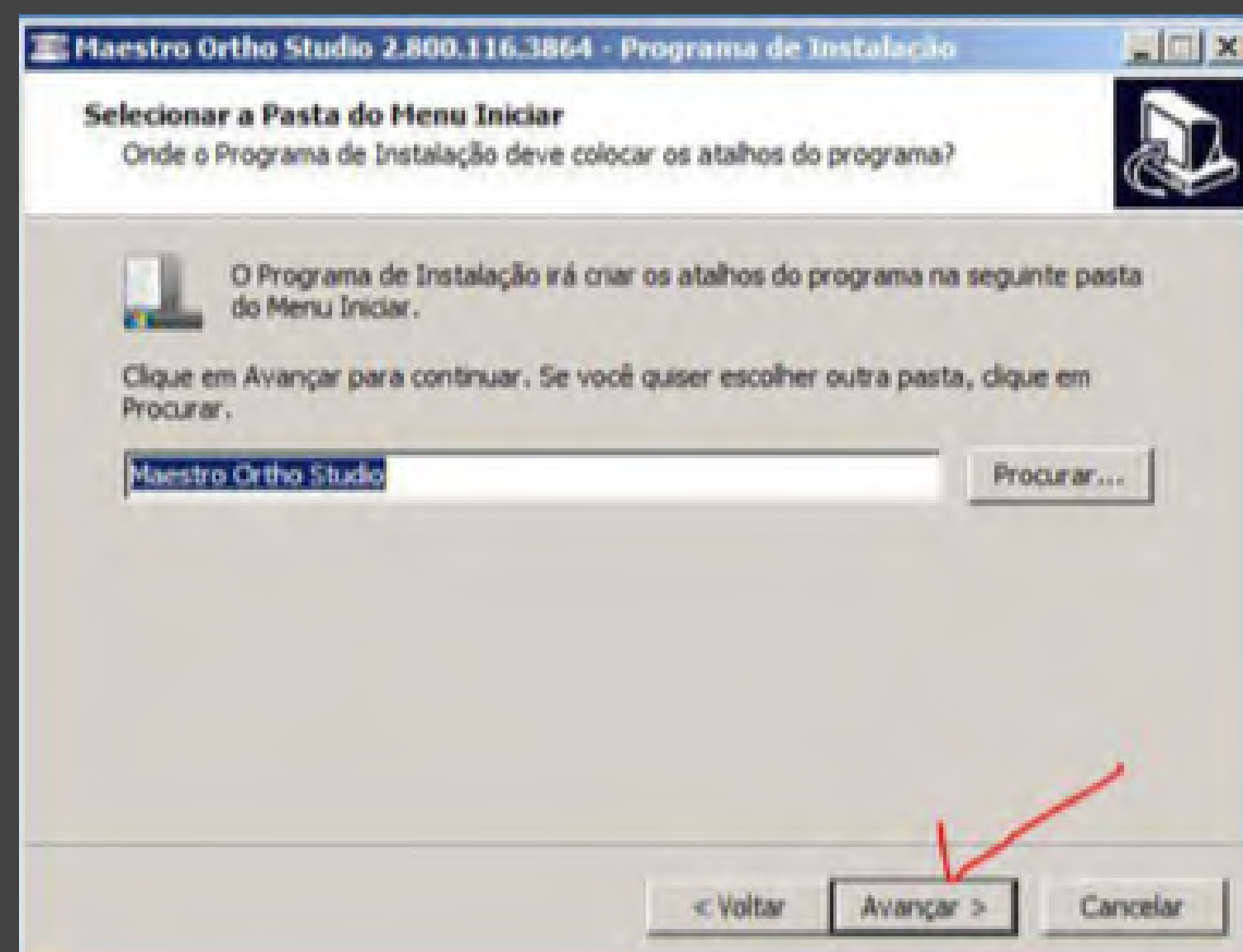


6

A criação de um ícone na
Área de Trabalho está
sendo feita... **Avance.**

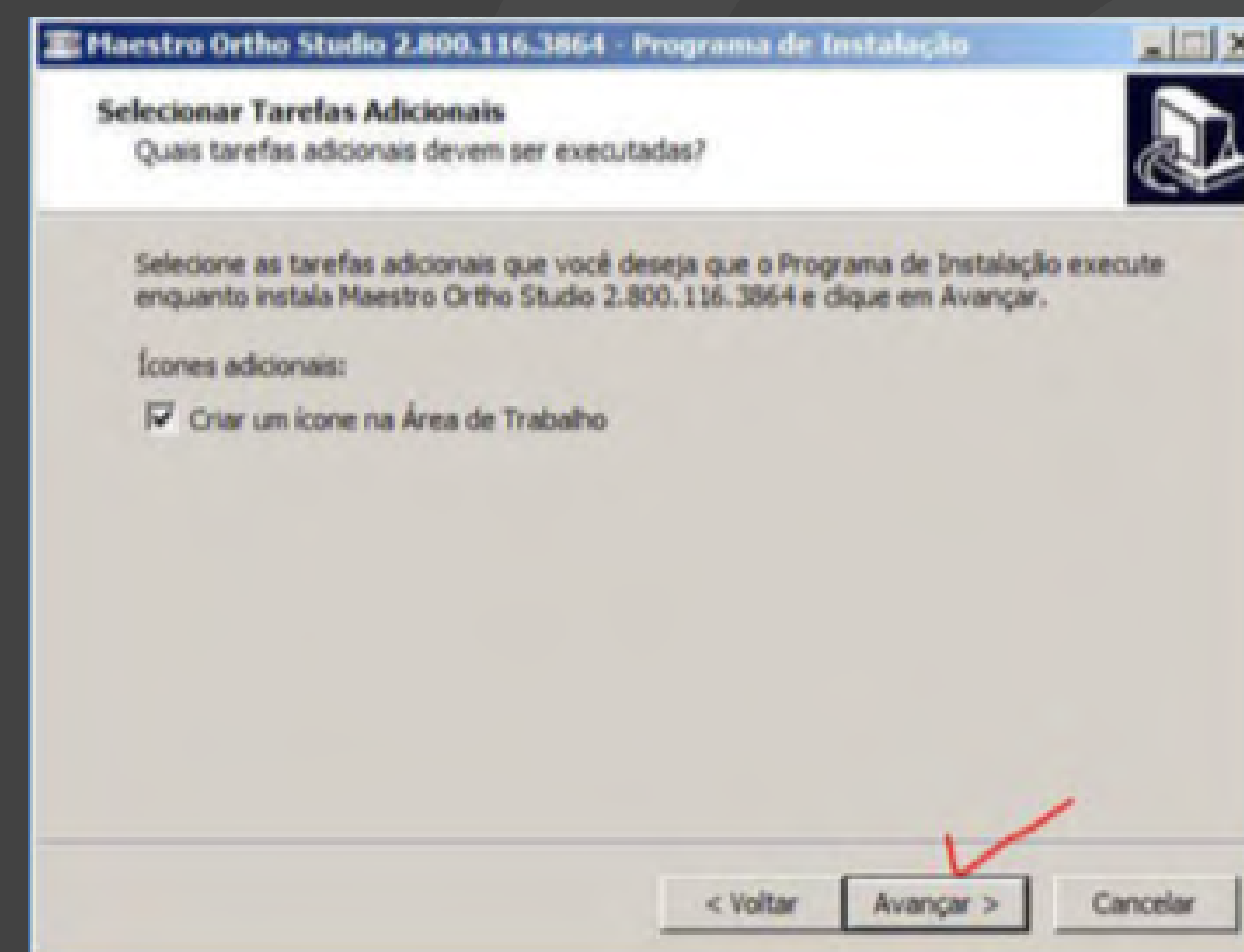

7

Agora é instalar.
Clique em "Instalar" e
aguarde o processo terminar.

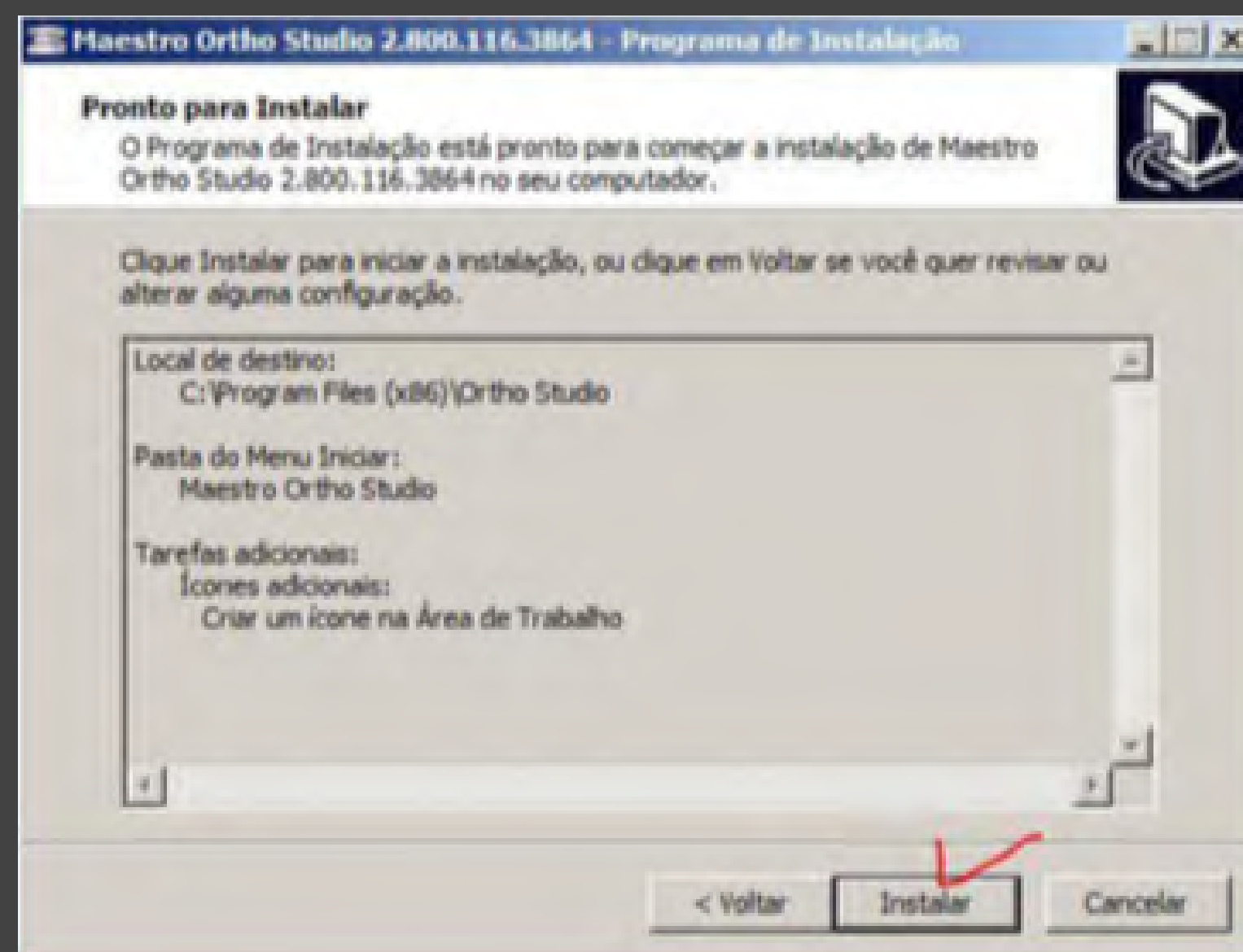

8

Pronto!
Clique em concluir.





**O Maestro Studio
Viewer está instalado!**

Mas, há algo mais a realizar:
a ativação do software.

Continue seguindo...


Ativação do Software

Como já comentado, é necessário realizar a ativação do programa.

Vamos seguir os próximos passos...

1

Clique com **botão direito** no ícone do Maestro Ortho Studio Viewer e selecione "**Executar como administrador**".

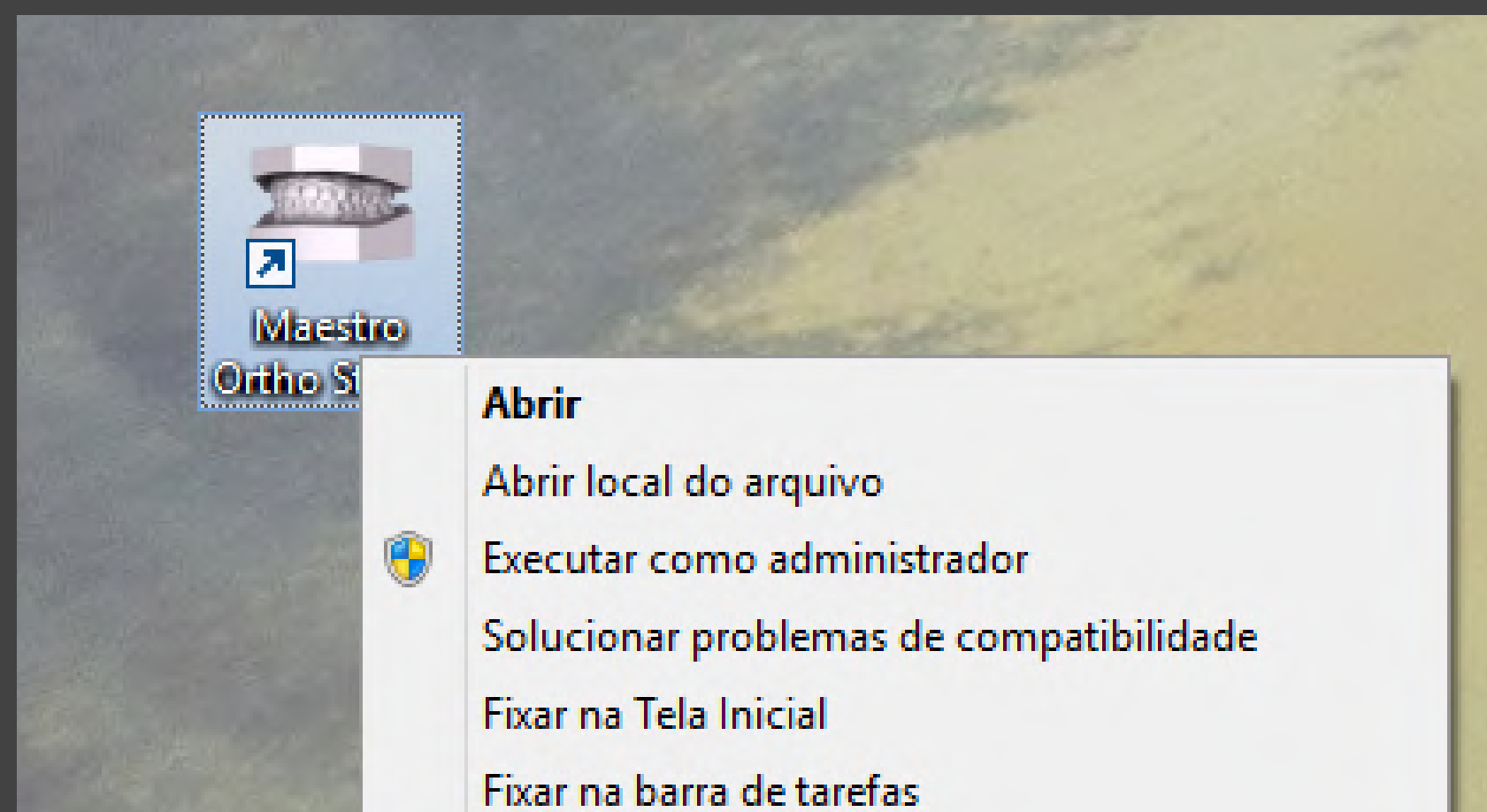

2


A solicitação de licença começa aqui. Clique em "Save product key"



3


O sistema pede para escolher uma pasta pra salvar um arquivo importante. Escolha a Área de trabalho.

Não feche essa janela.

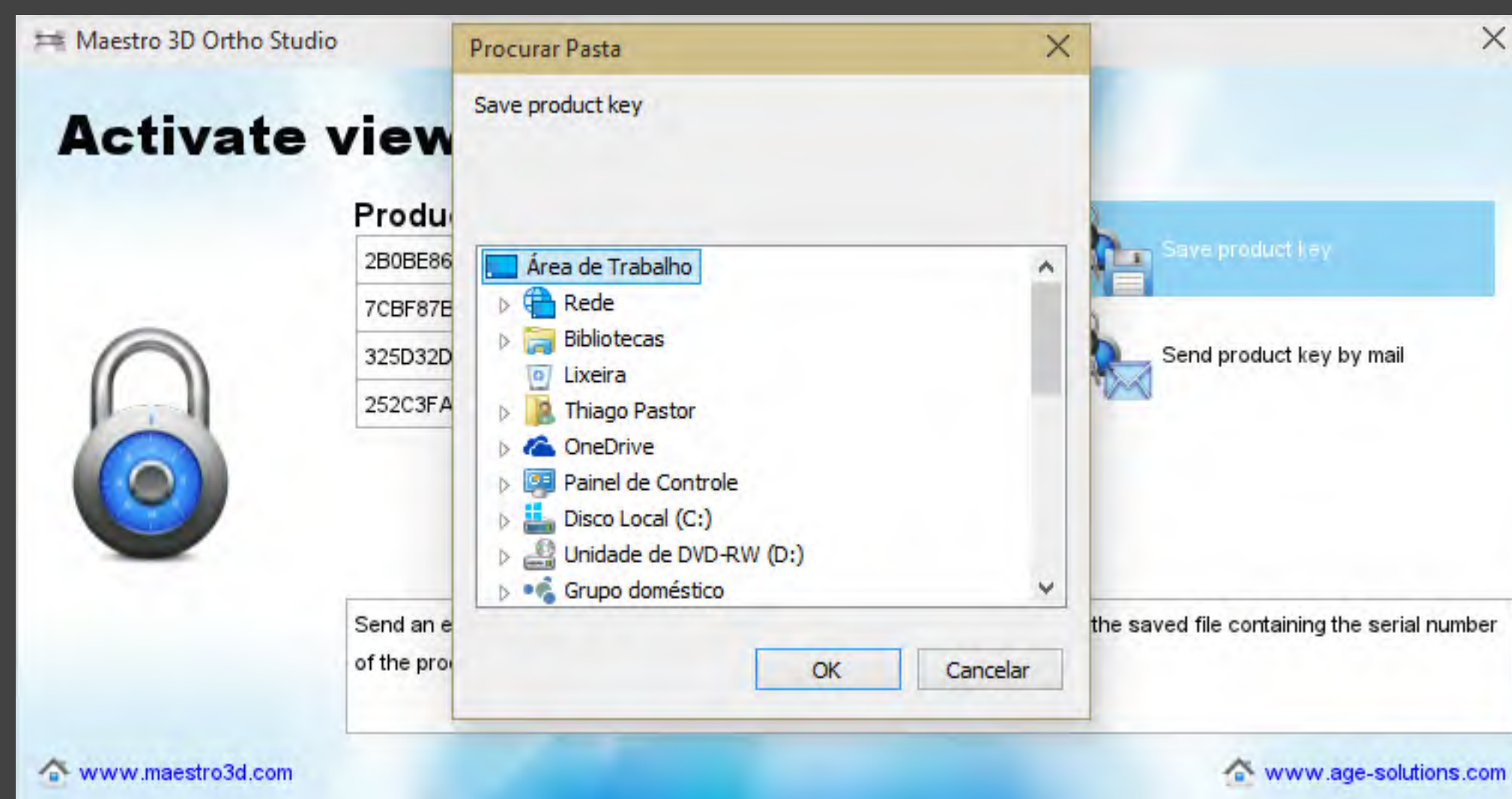

4

Um arquivo foi criado e agora precisamos enviá-lo à fornecedora.

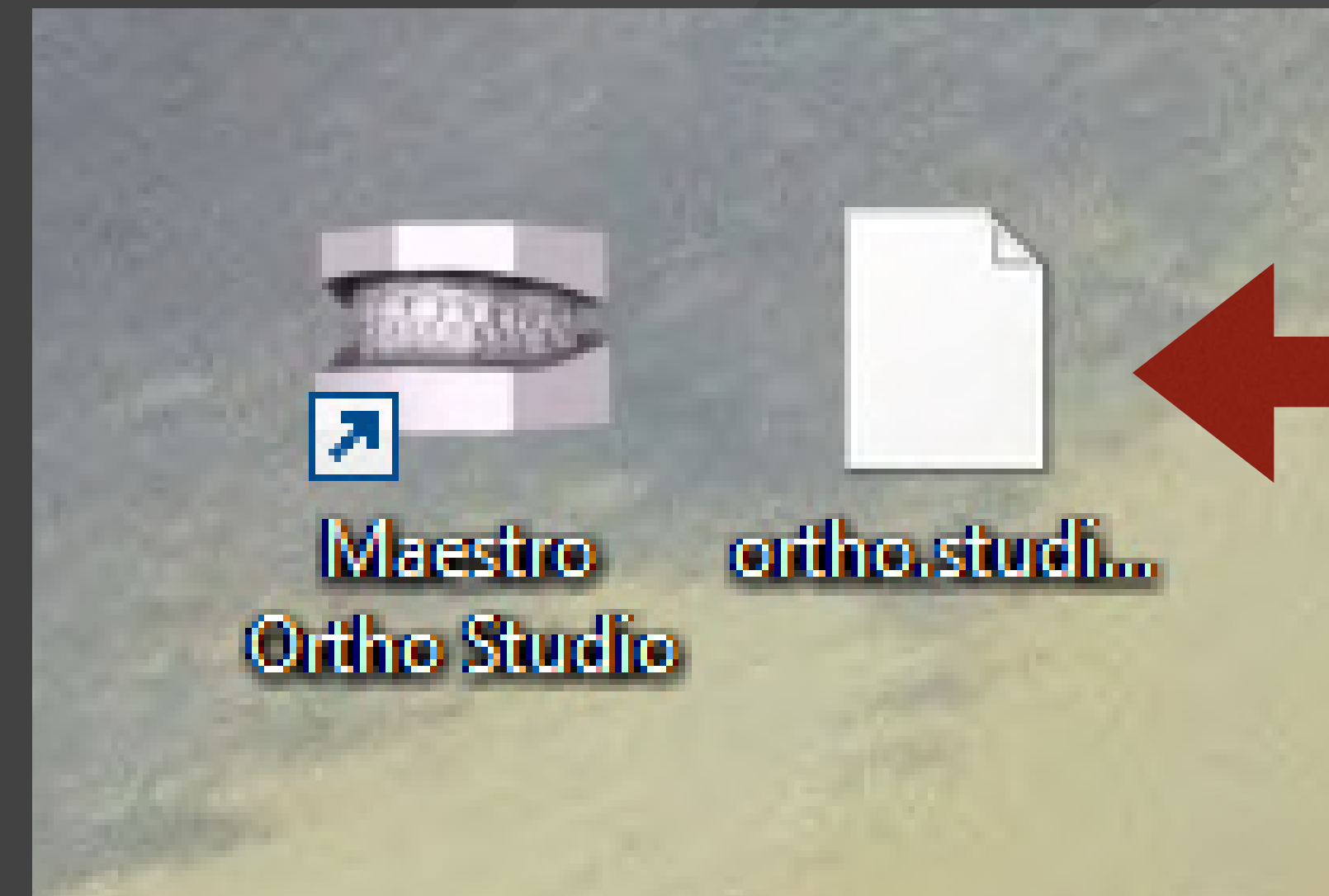

5

Novamente, entre em www.odontoi.com.br/maestro e preencha o formulário abaixo com seus dados. Atente-se de digitar um **email** existente e ativo.

Em “Product key” clique em *Escolher arquivo* e selecione o arquivo que foi criado na etapa anterior.

Após isso, **valide** seu formulário digitando o número da imagem no CAPTCHA e clique em Submit.

Obter licença – Maestro Studio Viewer

Please insert information below

Name

Country

E-mail

Product key ortho.studio....product.key.k




reCAPTCHA™ stop spam. read books.

6

Você receberá um email da *Age Solutions* com um arquivo que liberará sua licença.

Salve-o na Área de Trabalho.

Caso não o tenha recebido, cheque sua **Caixa de Spam**.

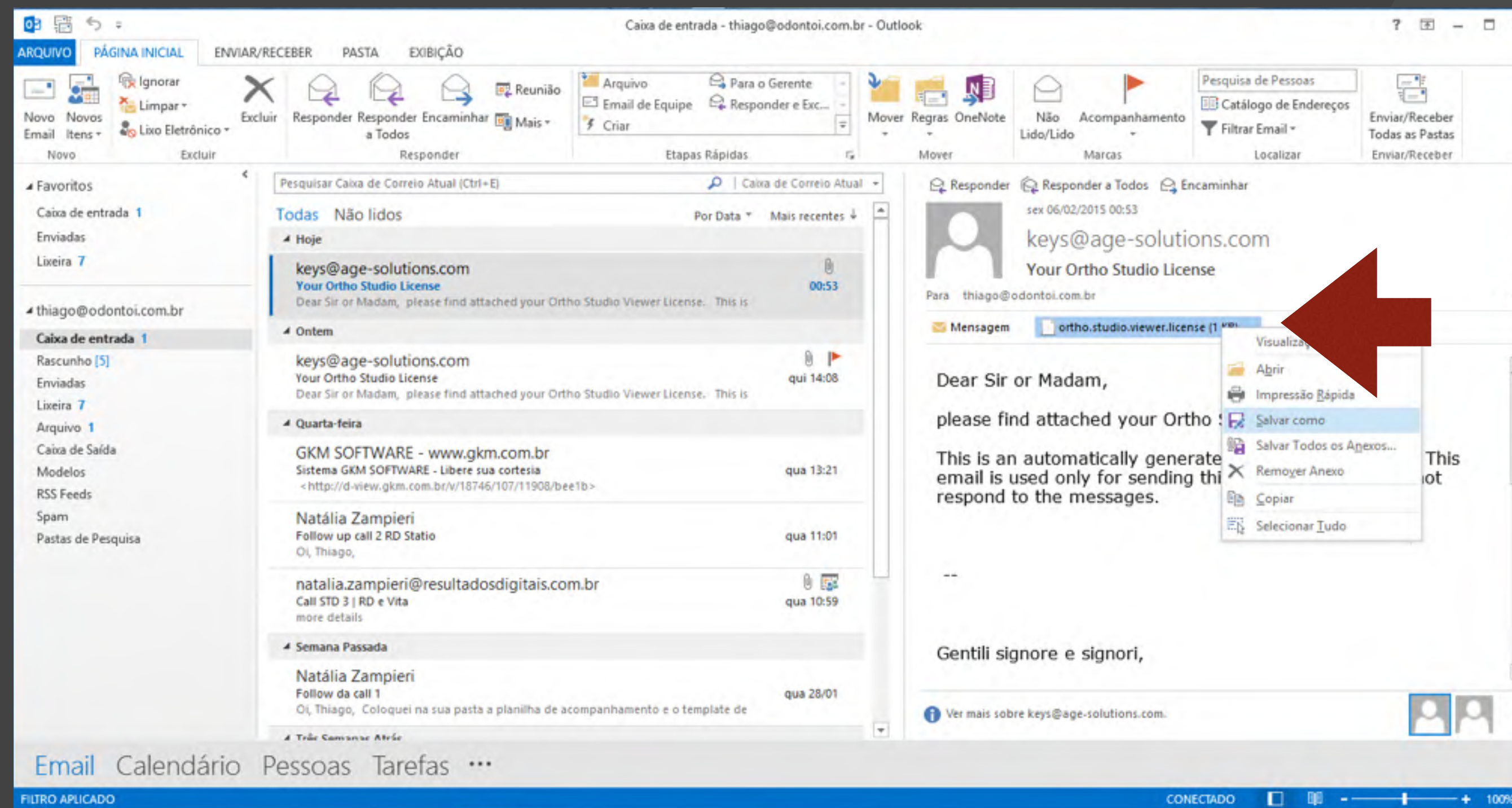


7


Volte a janela do software e clique em “Load the license file”.



8

Selecione o arquivo recebido por email. Deve estar na Área de Trabalho.

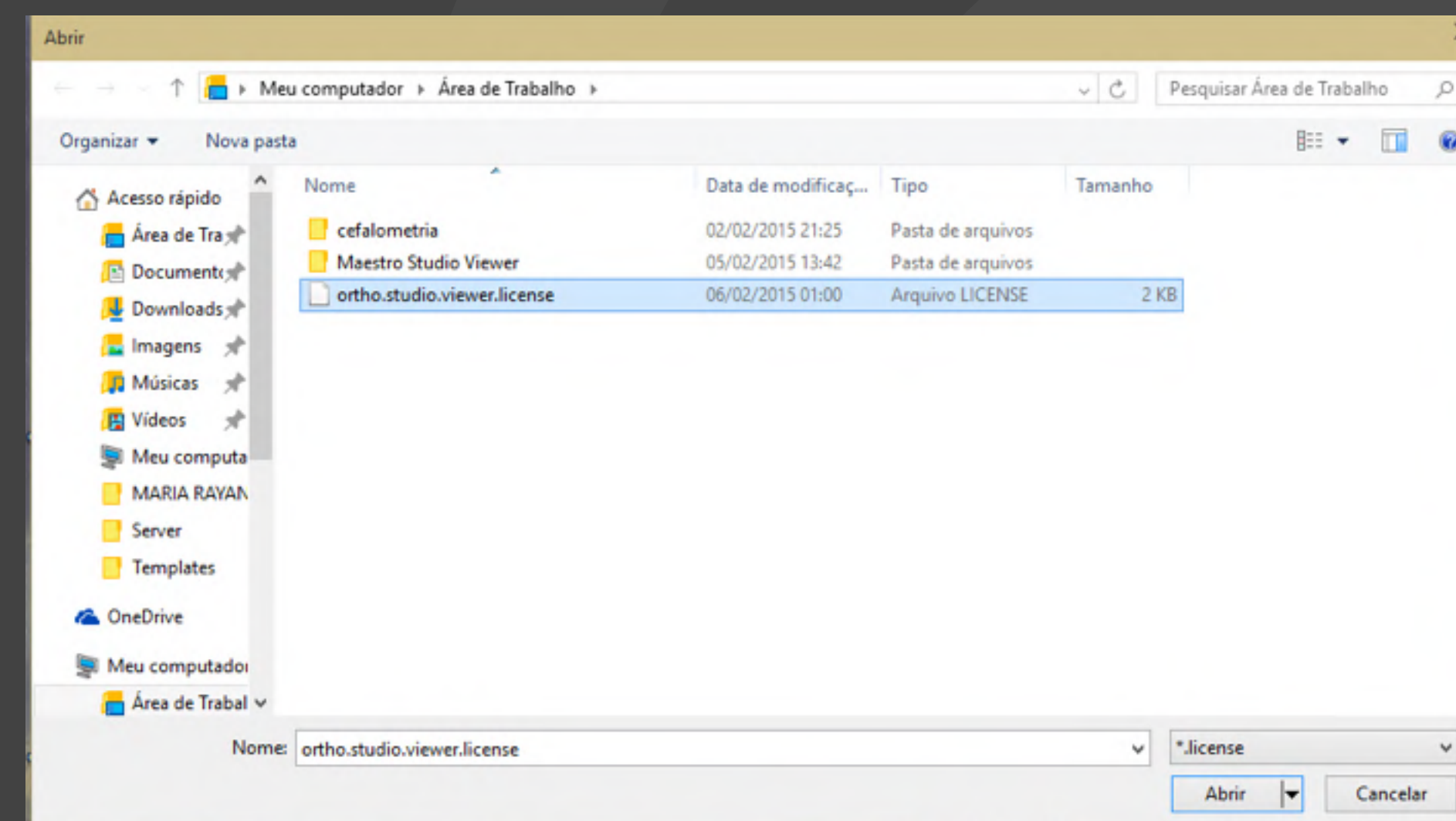

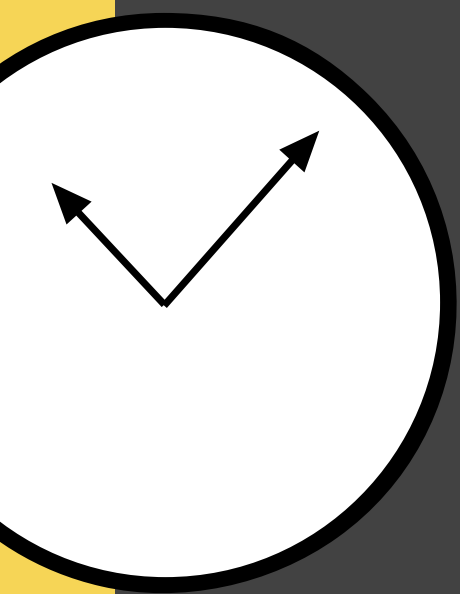

Sua licença foi autorizada!

Agora você pode fazer uso do software.

Em caso de erro:

Refaça o procedimento passo-a-passo com mais **atenção.**

ou

Preencha o formulário de Suporte Maestro no site em www.odontoi.com.br/maestro.

ou

Envie Whatsapp para **(91) 98282-7777** comunicando o erro.



**Quem são os
idealizadores deste manual?**



Conheça

Thiago Pastor da Silva Pinheiro

- ▶ Especialista em Radiologia Odontológica (ABO-DF)
- ▶ MBA em Gestão Empresarial (FGV-Ideal)
- ▶ Mestre em Odontologia - Diagnóstico por imagem (UFPa)
- ▶ Professor do Curso de Especialização em Ortodontia (CESUPA)
- ▶ Consultor Modelos 3D e Tecnologias associadas - True Image.



91 98282 7777



/drthiago



@dentistatech



Conheça Odonto.i 3D

A **Odonto.i 3D** iniciou suas atividades em Abaetetuba-PA, terra conhecida pelos brinquedos de Miriti, Açaí e de sua história na cultura paraense.

Da origem do produto mais famoso da terra, o **Miritizeiro**, retiramos a força da nossa essência e implementamos em nosso **plano estratégico**: um serviço **Odonto.i 3D** deve ser Sustentável, Flexível, Versátil, Inovador, Simples e Social.

Hoje, além da unidade Abaetetuba e unidade Belém (Umarizal), continua expandindo com mais 2 unidades dentro da Capital, além de Castanhal.

Saiba mais em

www.

odontoi.

com.br



Odonto.i **3D**

Para um novo momento, uma outra dimensão.